



POSIFORLID®

Masque pour les yeux

**DISPONIBLE
EN PHARMACIE**

MODE D'EMPLOI*

Le masque pour les yeux est prêt à l'emploi lorsque son contenu orange est liquide. Si son contenu est solide, il faut d'abord faire bouillir le masque durant 10 min avant son utilisation.



Humidifiez deux disques de coton et glissez-les dans le masque par l'ouverture du haut.



Pliez les deux pastilles métalliques pour activer la chaleur du masque. Malaxer le contenu orange afin de répartir la chaleur.




Posez le masque pour les yeux avec la partie ouverte sur les yeux et ce durant 5-7 minutes.



Enlevez les disques de coton du masque et utilisez-les pour masser et nettoyer la lisière de vos cils.

Soins des paupières

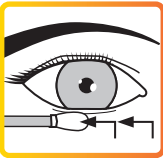

Exercer un mouvement de bas en haut et vers l'extérieur pour les paupières inférieures




Exercer un mouvement de haut en bas et vers l'extérieur pour les paupières supérieures



Nettoyer avec un disque de coton propre et humide

Faire bouillir après utilisation (sans son étui)

10 min. grand volume d'eau bouillante

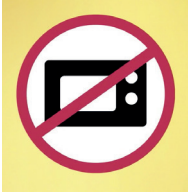

07420156/BE/032019

1 pièce - CNK: 3418-761
2 pièces - CNK: 3405-727

*** Veuillez lire également l'entièreté de la notice avant la première utilisation!**

Ursapharm B.V. Steenovenweg 5, NL-5708 HN Helmond,
info@ursapharm.be / www.ursapharm.be

URSAPHARM
Benelux B.V.