

LE SYSTÈME BREVETÉ COMOD®



1ÈRE ÉTAPE :

Commencez par retirer le capuchon de protection. Tenez le flacon COMOD® tête en bas comme indiqué sur l'image.



2ÈME ÉTAPE :

Posez la main qui tient le flacon COMOD® sur votre main libre.



3ÈME ÉTAPE :

À l'aide de votre main libre, tirez la paupière inférieure vers le bas. Appuyez brièvement sur le fond du flacon. Remettez le capuchon de protection en place.

- ✓ Ne nécessite aucun conservateur
- ✓ Se conserve 6 mois après ouverture
- ✓ Flacon **HYLO®** de 300 gouttes de volume constant
- ✓ Dosage précis et économique
- ✓ Système multi-doses breveté et technique de valve sophistiquée : la pompe hermétique empêche la solution d'entrer en contact avec l'air ambiant

